

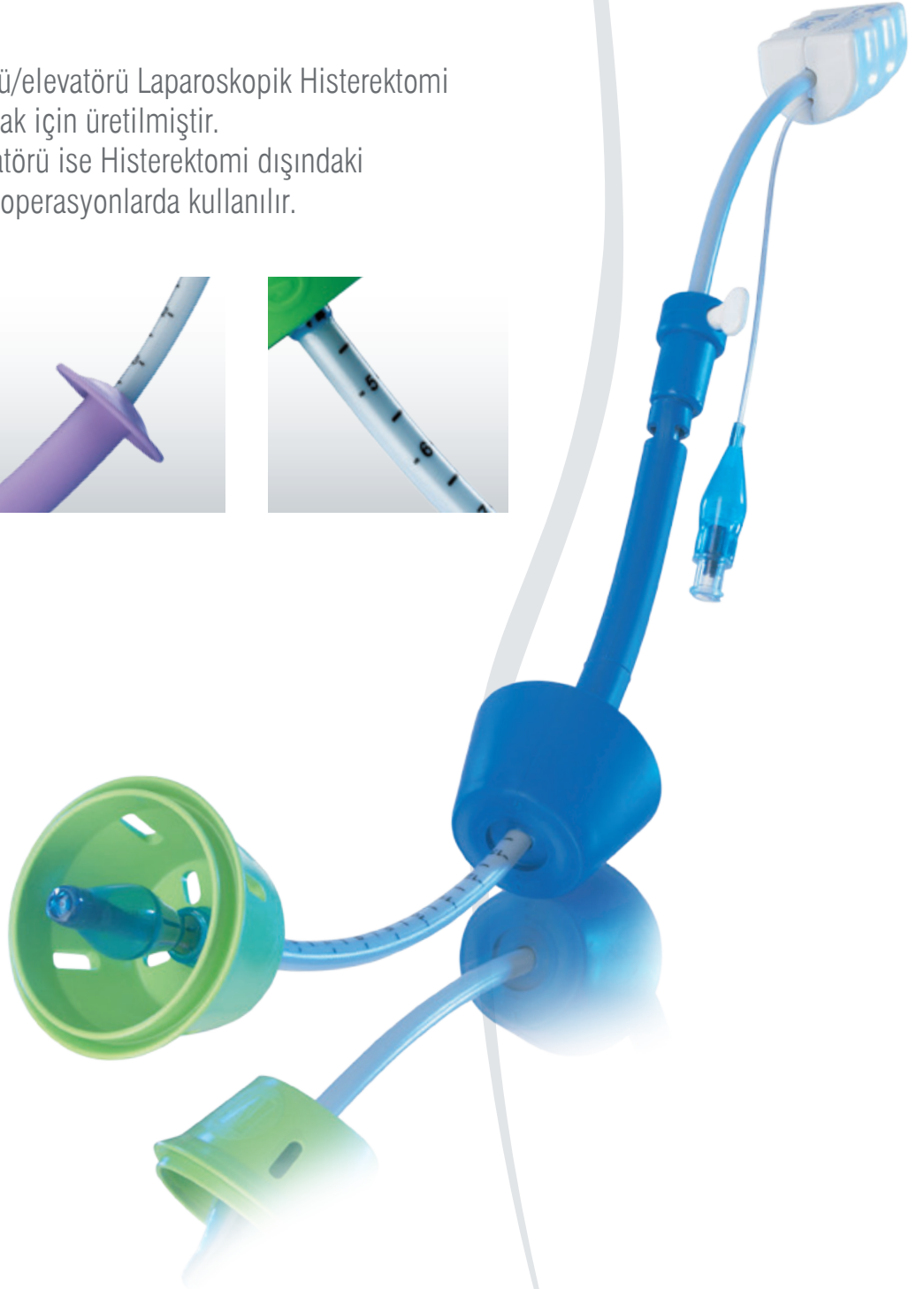


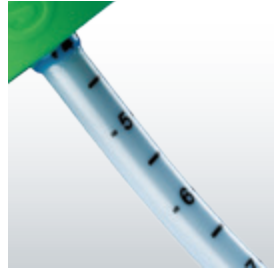

## VCare® ve VCare Dx™

VCare uterin manipulatörü/elevatörü Laparoskopik Histerektomi operasyonunda kullanılmak için üretilmiştir. VCare Dx uterin manipulatörü ise Histerektomi dışındaki Jinekolojik Laparoskopik operasyonlarda kullanılır.

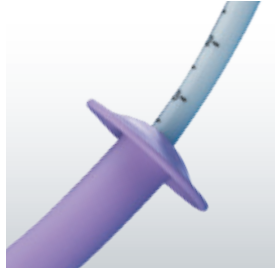

CONMED  
VCARE & VCARE DX  
ENDOCERRAHI

## VCare® ve VCare Dx™


### JİNEKOLOJİK LAPAROSKOPİ İÇİN VAZGEÇİLMEZ

VCare Laparoskopisi desteğinde yapılacak Vajinal Histerektomi (LAVH), Tam Laparoskopik Histerektomi (TLH) ve Laparoskopik Supraservikal Histerektomi (LSH) operasyonunda kullanılmak amacı ile tasarlanmış ve üretilmiştir.

VCare cerrahın uterusu manüple ederek pelvik tabanda yer alan hedefindeki yapı ve dokulara daha kolay ve güvenle ulaşmasını, tanımlamasını ve anatomik referans noktalarını belirlemesini sağlar.


Bu harmonik uyumlu enstruman ile:

- Serviks üreterlerden uzaklaştırılır,
- Mesane anteriorial duvardan ayırır,
- Kolpotomi yapılacak diseksiyon düzlemini belirler,
- Kolpotomi sırasında pneumoperitoneum kaybını önler.

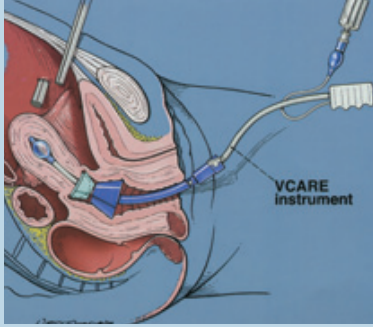

### VCare® in place



Cerrahlar için bu daha güvenli, hızlı, tekrarlanabilir, kararlı ameliyatlara yapabilmeye olanağı demektir. Bunlar ise ameliyat süresinin kısalması anlamına gelir. Hastalar içinse bu daha az kan kaybı, rahatsızlık ve hızlı iyileşme demektir.†

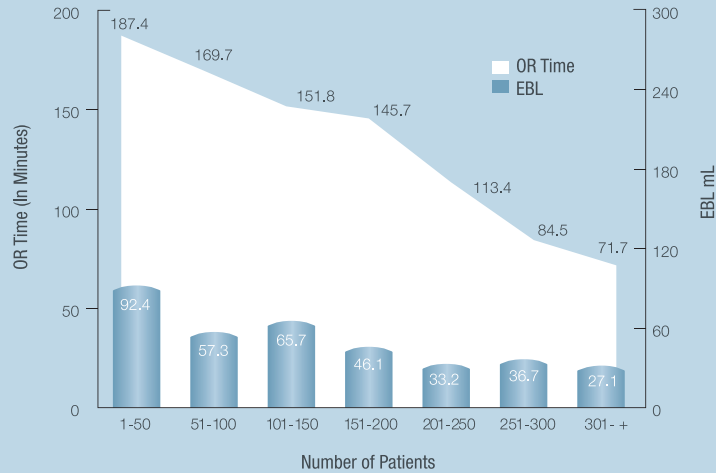

\*4. Dünya Laparoskopik Histerektomi Senpozyumunda sunulmuştur. Nisan 1997, Dr. Prabhat K.Ahluwala

VCareDx ise servikal tanımlama ve manüplasyon gerekmeyen Lap Tuballerde, myomektomilerde endometriosis tedavisinde ve dyeperturbation işlemlerinde kullanılmak için tasarlanmış ve üretilmiştir.

†The American Academy of Gynecologic Laparoscopists (AAGL) November 7, 2010 in the Journal of Minimally Invasive Gynecology.

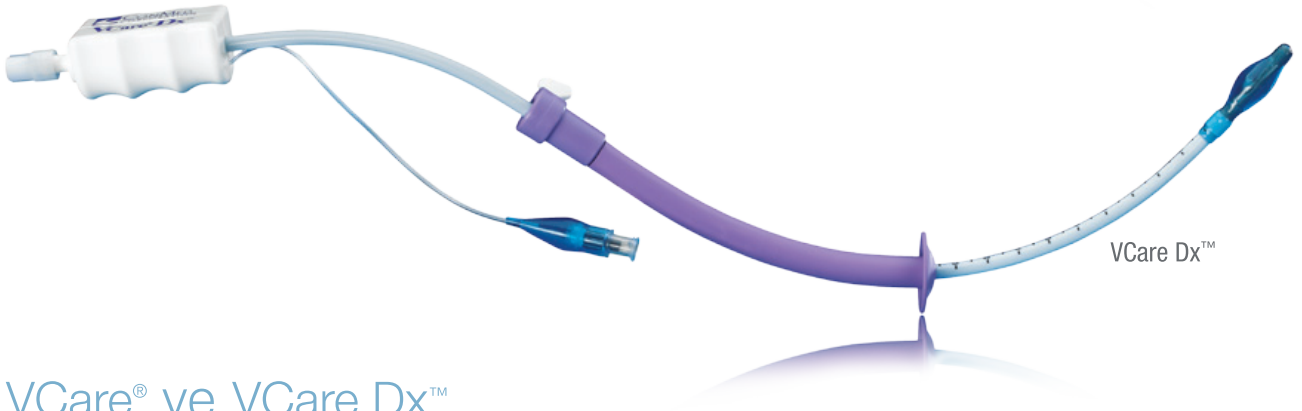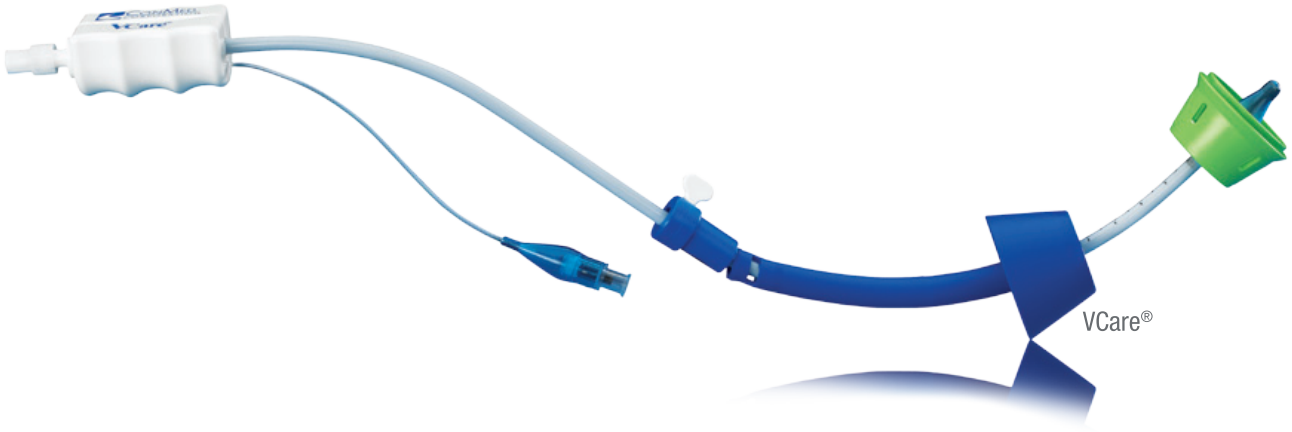

## VCare® ve VCare Dx™

– VCare özel tasarlanmış çift fincan (cup) tasarımına sahiptir.

Uçtaki fincan servikse oturarak serviksi üreterlerden uzaklaştırır, mesaneyi iter ve kolpotomi diseksiyonunun düzlemini belirler.

Gerideki fincan ise colpotomi sırasında pneumoperitoneum kaybını engeller.

Basit sabitleme vidası fincanları yerlerinde sabitler.

Delikler ise isteğe bağlı olarak dikiş ile fincanın yerine sabitlenmesini sağlar.


– Manipulatör tüpü anatomik sakral eğime uyumludur ve uterusun kolayca manüple edilmesini sağlar.

– Uçta bulunan 10cc lik şişirilebilen balon üterin perforasyon riskini azaltır ve manipulatörün uterin duvarına tutunmasını sağlar.

– Kabzanın özel tasarımı aşağı yukarı ve yanlara hareketi kolaylaştırırken el yorgunluğunu azaltır.

– Ergonomik olarak şekillendirilmiş Şaft retroverted ve anteverted pozisyonlu üreterlerde kullanımı kolaylaştırır.

– Şaft üzerindeki skala girişin güvenle yapılmasını sağlar.

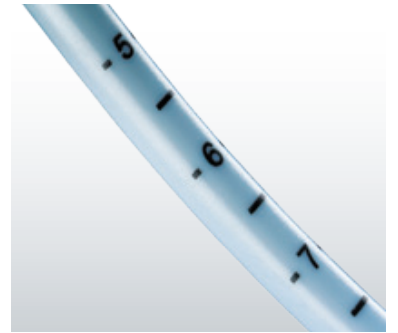

CONMED  
VCARE & VCARE DX  
ENDOCERRAHİ

Her hasta farklıdır. İyi sonuç almak için  
“en iyi” kullanılmalıdır.

**Yeni daha parlak yeşil renkteki ön servikal fincan:** Bu yeni parlak renk kolpotomi sırasında daha iyi renk kontrastı ile fincanın kolay tanımlanması sağlar.

**Extra large fincan boyutu-VCare artık 4 fincan ölçüsü ile üretilmektedir:** Small (32mm çapında), Medium (34mm çapında) önceki standart ölçüde, Large (37mm çapında) and ExtraLarge (40mm çapında).

**Daha derin fincan geometrisi:** Yeni daha derin fincan geometrisi kullanıcının hastanın anatomisine karşı cervixin şeklinden bağımsız olarak daha ileri itmesini ve kenarların abdomen içinden daha iyi izlenmesini ve tanımlanmasını sağlar.

**Yeni ölçü tanımlaması:** Fincan ölçüleri fincanın kenarlarında ve daha rahat görülecek şekilde yerleştirilmiştir. Paket dışında bulunduğu da tanınabilir.

**Ek ve daha fazla dikiş deliği:** Ön fincanı dikiş ile sabitlemeyi tercih edebilecek cerrahların işini kolaylaştırmak için daha büyük ve çok dikiş deliği vardır.

**Şaft üzerindeki işaretleme:** Manüplasyon olanağını artırmak ve rahatlatmaya yardımcı olmak için shaft üzerinde uterin derinliğini belirleyen işaretlemeler mevcuttur.



## Sipariş Bilgileri

Referans No.	Ürün Tanımı	Paket
60-6085-200	VCare®, Small (32mm) Cervical Cup	1/pkg, 8/cs
60-6085-201	VCare®, Medium (34mm) Cervical Cup	1/pkg, 8/cs
60-6085-202	VCare®, Large (37mm) Cervical Cup	1/pkg, 8/cs
60-6085-203	VCare®, X-Large (40mm) Cervical Cup	1/pkg, 8/cs
60-6080-000	VCare Dx™ Manipulator	1/pkg, 8/cs

**ENDO & LAP**  
İthalat İhracat Mümessillik Ltd. Şti.

Mustafa Kemal Mah. 2119. Sk. No: 6/6 Çankaya/ANKARA  
Tel: 0312 219 50 85 (pbx) • Fax: 0312 219 54 67  
info@endolap.com.tr • www.endolap.com.tr